



Merkmale

Überwachung: Herzrate, Atmung

Betriebsdauer mit Batterie/Akku: min. 24 Stunden

Messfunktionen: QRS-Amplitude, Grundimpedanz

Anzeigen: LCD-Grafikdisplay, 5 LEDs

Speicherarten: Ereignis, Langzeit, Trend, Compliance

Alarmmeldung: akustisch und optisch

Datenübertragung: Mini-USB

Der VitaGuard® VG 2100

Der Herz- und Atmungsmonitor

Der VitaGuard®-Monitor VG 2100 überwacht die lebenswichtigen Vitalfunktionen Atmung und Herzrate bei Patienten aller Altersgruppen. Dies gibt Ärzten, medizinischen Pflegekräften und Patientenbetreuern Sicherheit, sowohl im ambulanten als auch im stationären Einsatz des Monitors.

Funktionsweise

Der VitaGuard® gibt akustisch und optisch Alarm, wenn innerhalb einer vorgegebenen Zeit keine Atmung erkannt wird* oder die eingestellten Werte zur Herzrate über- oder unterschritten werden. Bei ungenügendem Elektrodenkontakt wird ein technischer Alarm ausgelöst.

Vielseitiger Datenspeicher

Für wählbare Zeiträume vor, während und nach einem Alarm werden die physiologischen Daten, die Alarm-Grenzwerte sowie andere Monitorparameter automatisch gespeichert. Auf diese Weise werden 400 Alarm-Ereignisse erfasst, aber auch eine situationsbezogene, manuelle Speicherung und die Intervallspeicherung sind möglich. Der verfügbare Lang-

zeitspeicher hat eine Kapazität von 16 Stunden, der Trendspeicher sogar von 144 Stunden. Zusätzliche Grenzwerte ermöglichen darüber hinaus die Aufzeichnung von stillen Ereignissen.

Innovative Technik leicht bedienen

Bei allen diesen Leistungsmerkmalen wiegt der handliche GETEMED-Monitor nur etwa 660 Gramm. Die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet, so dass er für den Arzt ebenso einfach zu bedienen ist wie für den medizinischen Laien bei der Überwachung im häuslichen Umfeld. Der Monitor ist durch seine variable Stromversorgung – Netz, Blockakku oder Batterien – sehr flexibel einsetzbar.

Umfassende Datenauswertung mit VitaWin®

Die vom VitaGuard® VG 2100 gespeicherten Messwerte, Signalkurven und Einstellungen werden, wenn gewünscht, im hochauflösenden LCD-Display angezeigt. Über eine USB-Schnittstelle können die Daten auch auf den PC übertragen und mit der Auswertesoftware VitaWin® umfassend dokumentiert, grafisch dargestellt und befundet werden.



* obstruktive Apnoen werden nicht erkannt

VitaGuard® VG 2100

Technische Daten

Allgemein

Gewicht	ca. 660 g (mit Blockakku)
Abmessungen	205 mm x 135 mm x 45 mm
Stromversorgung	4,8 V NiMH Blockakku oder 4 x 1,5 V Alkaline LR6 Batterien, 9 V Netzadapter NA 3000-2
Netzadapter NA 3000-2	Eingang: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, Ausgang: 9 VDC
Blockakkuladezeit	< 6 h
Betriebsdauer	24 h mit Blockakku oder Batterien
Batteriewechselanzeige	im Display
Batterieerschöpfung	visueller und akustischer Hinweis
Tasten	6 wischfeste Kurzhubtasten
Anschluss EKG/Atmung	8-polige Rundbuchse, Schutzklasse BF
Anschluss USB	Mini-USB zur Datenübertragung zum PC
Anzeigen	5 LEDs und LCD-Grafikdisplay (320 x 240 Pixel), Hinterleuchtung bei Betrieb über Netzadapter
Alarmmeldungen	akustisch und optisch

Apnoe-Monitor

Messmethode	Impedanzpneumographie
Auflösung	1/min
Atmungspausenzeit	8, 10, 12 ... 30, 32, 34 s
Alarmunterbrechung	2 Atmungssignale innerhalb von 6 s
Minimale Amplitude	ca. 0,2 Ohm
Signalerkennung	grüne LED und anwählbarer Piepton

Herzraten-Monitor

Messbereich	20 ... 270/min
Auflösung	1/min
Untere Alarmgrenze	30, 35 ... 175, 180/min
Obere Alarmgrenze	100, 105 ... 250, 255/min
Minimale Amplitude	ca. 0,2 mV
Wählbare Ableitungen	I, II oder III nach Einthoven
Signalerkennung	grüne LED und anwählbarer Piepton

Speicher

Speicherart	Ereignisspeicher (Alarm, manuell, Intervall), Trend- und Langzeitspei- cher sowie Compliance-Protokoll
Speicherkapazität	400 Ereignisse, 144 h Trendspeicher, 16 h Langzeitspeicher
Datentypen	EKG, Herzrate, Atmung, Grund- impedanz, Statusinformation

Klassifizierungen

Produktklassifizierung	IIb gemäß 93/42/EWG
IP-Klassifizierung	IP 21
Hilfsmittelnummer	21.24.02.4014

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5 ... 40 °C
Feuchtigkeit	5 ... 95 %, nicht kondensierend
Lager- und Transporttemperatur	-40 ... 70 °C

Lieferumfang

VitaGuard® VG 2100, EKG-Patientenkabel,
3 Dreier-Sets Kinderelektroden, Netzadapter NA 3000-2,
NiMH Blockakku, Gebrauchsanweisung,
Tragetasche mit Riemen, Transportkoffer

Weitere Artikel

Auswertesoftware VitaWin®

Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler



TEMeba
TECHNISCHER MEDIZIN SERVICE

Rosenheimer Straße 16 · 83059 Kolbermoor
Inh. Alexander Schmid
FON 0 80 31 . 78 07 65 FAX 0 80 31 . 78 07 66
EMAIL service@temeba.de WEB www.temeba.de

Hersteller



GETEMED
Medizin- und Informationstechnik AG
Oderstraße 77 / 14513 Teltow
Telefon +49 3328 3942-0
Telefax +49 3328 3942-99
info@getemed.de / www.getemed.de